



## Eksempler på korrekt og forkert prøvetagning

### Korrekt ✓

Filterpapiret er helt gennemvædet med blod på bagsiden.



Cirklerne er ensartet fyldt ud på både forsiden og bagsiden.

Perfekt taget blodprøve.

### Forkert ✗


Filterpapiret er slet ikke gennemvædet på bagsiden.



Cirklerne er fyldt ud på forsiden, men når filterpapiret vendes, er blodet ikke trængt igennem og har gennemvædet bagsiden.

### Forkert ✗

Filterpapiret er ikke nok gennemvædet på bagsiden.

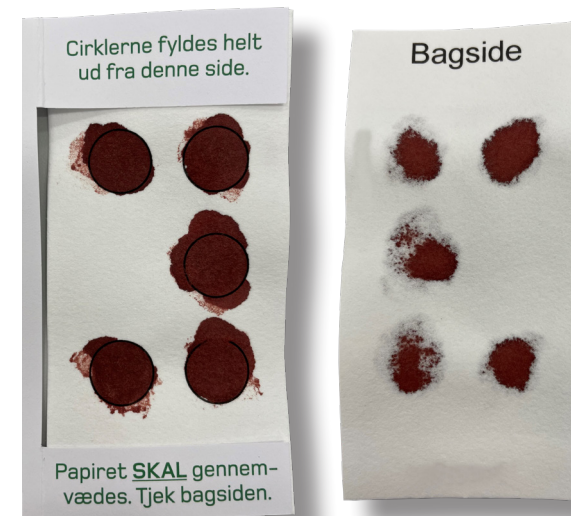

Cirklerne er fyldt ud på forsiden, men der er ikke et stort nok areal af gennemvædet filterpapir på bagsiden, til at analyserne kan foretages korrekt.