


# Bagsiden

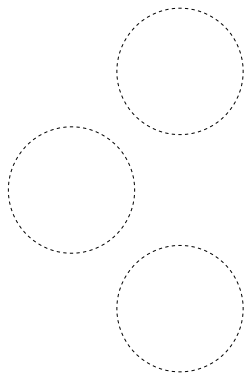

XXXXXXXXXX

## BLODPRØVE FRA NYFØDTE

**Mor** CPR-nr.:

Fornavn:

Efternavn:

**Barn** CPR-nr.:

**OBS!**

Evt. etiket bedes anbragt vandret  
op mod det optrukne venstre hjørne  
(af hensyn til optisk læsning)

Intern SSI SG barcode

Evt. kommentarer til SSI:

.....

.....

.....

.....

Gentaget prøve:

Placer glasnummer her

Prøvetagningsdato (ddmmår):

Fulde graviditetsuger:

Fødselsvægt:

Prøvetagningstidspunkt:

Kl:  :

Prøven taget af (initialer):

Fødselstidspunkt:

Kl:  :

Pige:

Dreng:

Hospital:

XXXXXXXXXX



STATENS  
SERUM  
INSTITUT

# INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALET

Prøvetagningskort til screening af nyfødte med henblik på tidlig diagnosticering og behandling af alvorlige medfødte sygdomme i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

## Prøvetagningsvejledning

Blodprøven tages 48-72 timer efter fødslen. Prøven bør dog altid tages, selvom de 72 timer er overskredet. Prøven skal være kapillærblod, der tages fra barnets hæl.

Alle tre cirkler skal fyldes helt ud.

For at kunne give et retvisende billede af analyserne, skal filterpapiret være helt gennemvædet med blod. Tjek bagsiden.

**Det er meget vigtigt, at blodprøven tages korrekt.**

**Se [ssi.dk/nyfoedte](https://ssi.dk/nyfoedte) eller scan QR-koden.**

**HUSK:** Det er vigtigt, at prøven lufttørres ved stuetemperatur i cirka 3 timer inden forsendelse. Undgå direkte sollys, radiator eller lignende.

Da flere af sygdommene kan debutere kort tid efter fødslen, skal prøven hurtigst muligt transporteres til SSI i den tilhørende PKU-kuvert. Anvendes anden kuvert skal denne markeres tydeligt med "Blodprøve fra nyfødte".

Sendes prøvetagningskortet med posten, skal brevet sendes som Quickbrev til:

**Statens Serum Institut  
PDC Bygning 85  
Artillerivej 5  
2300 København S**

Børn født før 32 fulde gestationsuger skal have taget to prøver. Første prøve tages 48-72 timer efter fødslen. Anden prøve tages, når barnet når en alder svarende til 32. gestationsuge. Dog tidligst en uge efter første prøve.

Nye prøvetagningskort kan rekvireres på tlf. 3268 3111 eller [ordre@ssi.dk](mailto:ordre@ssi.dk).

Forespørgsler vedrørende indsendte prøver (modtagelse, svarafgivelse etc.) rettes til tlf. 3268 8420.

Information til  
sundhedspersonalet:



[ssi.dk/nyfoedte](https://ssi.dk/nyfoedte)

Information til forældrene:



[ssi.dk/nyfoedte](https://ssi.dk/nyfoedte)

Statens Serum Institut  
PDC Bygning 85  
Artillerivej 5  
2300 København S  
T +45 3268 8420  
@ [biokemi@ssi.dk](mailto:biokemi@ssi.dk)  
W [ssi.dk/nyfoedte](https://ssi.dk/nyfoedte)

Cirklerne fyldes helt ud med blod gennem hullerne nedenunder. Papiret **SKAL** gennemvædes.

## Tjek bagsiden

