

Bagside

XXXXXXXX

XXXXXXXX

BLODPRØVE FRA NYFØDTE

Mor CPR-nr.:

Fornavn:

Efternavn:

Barn CPR-nr.:

OBS!

Evt. etiket bedes anbragt vandret op mod det optrukne venstre hjørne (af hensyn til optisk læsning)

Forbeholdt SSI

Evt. kommentarer til SSI:

Gentaget prøve:

Prøvetagningsdato (ddmmår):

Fulde graviditetsuger:

Fødselsvægt:

Prøvetagningstidspunkt:

Prøven taget af (initialer):

Fødselstidspunkt:

Pige:

Dræng:

Hospital og evt. rekvirentnummer:

XXXXXXXXXX

13. udgave • Januar 2021



STATENS
SERUM
INSTITUT

Information til forældrene:



ssi.dk/nyfoedte

Hospitalets stregkode fra elektronisk bestilling placeres her

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S
T +45 3268 8420
@ biokemi@ssi.dk
W ssi.dk/nyfoedte



STATENS
SERUM
INSTITUT

Information til forældrene:



ssi.dk/nyfoedte

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S
T +45 3268 8420
@ biokemi@ssi.dk
W ssi.dk/nyfoedte

INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALET

Prøvetagningskort til screening af nyfødte med henblik på tidlig diagnosticering og behandling af alvorlige medfødte sygdomme i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Prøvetagningsvejledning

Blodprøven tages 48-72 timer efter fødslen. Prøven bør dog altid tages, selvom de 72 timer er overskredet. Prøven skal være kapillærblod, der tages fra barnets hæl.

Alle fem cirkler skal fyldes helt ud.

For at kunne give et retvisende billede af analyserne, skal filterpapiret være helt gennemvædet med blod. Tjek bagsiden.

Det er meget vigtigt, at blodprøven tages korrekt.

Se ssi.dk/nyfoedte eller scan QR-koden.

HUSK: Det er vigtigt, at prøven lufttørres ved stuetemperatur i cirka 3 timer inden forsendelse. Undgå direkte sollys, radiator eller lignende.

Da flere af sygdommene kan debutere kort tid efter fødslen, skal prøven hurtigst muligt transporteres til SSI i den tilhørende PKU-kuvert. Anvendes anden kuvert skal denne markeres tydeligt med "Blodprøve fra nyfødte".

Sendes prøvetagningskortet med posten, skal brevet sendes som Quickbrev til:

**Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S**

Der må ikke gå mere end 2 dage fra prøvetagning til prøven ankommer til SSI.

Børn født før 32 fulde gestationsuger skal have taget to prøver. Første prøve tages 48-72 timer efter fødslen. Anden prøve tages, når barnet når en alder svarende til 32. gestationsuge. Dog tidligst en uge efter første prøve.

Nye prøvetagningskort kan rekvireres på tlf. 3268 3111 eller ordre@ssi.dk.


Forespørgsler vedrørende indsendte prøver (modtagelse, svarafgivelse etc.) rettes til tlf. 3268 8420.

Information til sundhedspersonalet:



ssi.dk/nyfoedte

Cirklerne fyldes helt ud fra denne side.

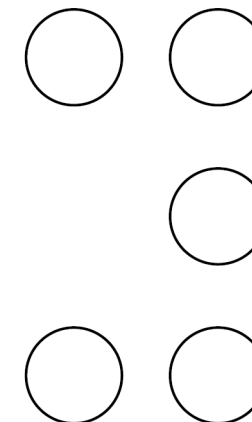

Papiret **SKAL** gennemvædes. Tjek bagsiden.